

Ponto Care

Mon allié au quotidien pour l'essai et le suivi de ma solution à ancrage osseux



oticon
MEDICAL

L'ESSAI

Vous essayez une aide auditive ?

Ponto Care est l'application de référence pour évaluer si la solution auditive à ancrage osseux est adaptée à vos besoins.

Positionnez le bandeau (muni de l'aide auditive) :

La position du bandeau conditionne la réussite de l'essai : placez-le comme vous l'a montré votre audioprothésiste.



Lancez l'Application Ponto Care et sélectionnez la rubrique **Ponto Trial Companion** :

1

TESTER

Faites l'expérience de différentes situations d'écoute de votre vie, dans différents endroits

2

EVALUER

Sélectionnez la situation à évaluer, choisissez le smiley représentant votre satisfaction et ajoutez un commentaire (lieu, ressentis) pour renseigner au maximum votre audioprothésiste

7 évaluations minimums sont nécessaires, dans au moins 3 situations différentes

3

PARTAGER

Envoyez vos évaluations à votre audioprothésiste avant votre prochain RDV

LE SUIVI

Vous utilisez déjà une solution auditive à ancrage osseux ?

Ponto Care est la seule application qui permet d'assurer le suivi à distance de votre solution auditive à ancrage osseux Ponto et vous renseigne au quotidien sur votre aide auditive.

Lancez l'Application Ponto Care et sélectionnez la rubrique **Suivi** :

OBTENEZ DES REPONSES

Trouvez rapidement les réponses à vos questions et celles des utilisateurs, au sujet de Ponto et de la vie quotidienne avec une aide auditive à ancrage osseux

Thèmes abordés : vie quotidienne, bonnes habitudes, IRM et Ponto, voyages

SURVEILLEZ L'EVOLUTION

Gardez un oeil sur votre zone d'implantation en prenant régulièrement des photos à l'aide de votre appareil photo, directement depuis l'application

SUIVEZ

Vos expériences auditives à l'aide du journal numérique

Ponto Care

Application gratuite
disponible en téléchargement

Assurez-vous de posséder les renseignements suivants avant de quitter le centre de votre audioprothésiste :

Nom de mon audioprothésiste :

Adresse e-mail de mon audioprothésiste :

Date de mon essai :

Du

au



Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.



Pour plus d'informations sur la compatibilité de l'application, veuillez consulter www.oticonmedical.com/ptc-app-compatibility