

Ponto Care

L'application dédiée à la vie quotidienne des candidats et utilisateurs Ponto, de l'essai au suivi post-implantation



Les atouts de l'application :

- Mesurez les **expériences et ressentis** du patient en situation réelle
- Orientez votre discours grâce au **suivi personnalisé**
- Renforcez l'**engagement du patient**
- Gagnez du temps grâce au **suivi dématérialisé**
- Complétez votre **compte-rendu** destiné au médecin ORL
- Améliorez l'appréciation du **service rendu**
- Offrez à votre patient un **outil d'aide au quotidien**



oticon
MEDICAL

L'ESSAI

Votre patient essaye son aide auditive Ponto ?

Positionner correctement le bandeau souple muni de l'aide auditive, lancer l'application **Ponto Care** et sélectionner la **rubrique Ponto Trial Companion** pour réaliser la 1ère évaluation avec le patient.

NB : Importance du commentaire (lieu + ressentis) pour revenir sur l'évaluation à postériori.

Inciter le patient à évaluer un maximum de situations pendant la période d'essai.

NB : 7 évaluations minimum sont nécessaires pour envoyer un rapport.

3 situations sont définies par défaut (milieu calme, bruyant et extérieur) + 1 situation au choix selon les habitudes de vie.

NB : Jusqu'à 5 évaluations possibles par situation.

Ne pas oublier de communiquer votre adresse e-mail au patient pour l'envoi du rapport !

LE SUIVI

Votre patient a eu recours à l'intervention chirurgicale et utilise sa solution à ancrage osseux Ponto ?

Ponto Care permet aux utilisateurs de trouver aisément les réponses à leurs questions relatives à la vie avec un Ponto. L'application facilite également le suivi entre 2 rendez-vous via la prise de photos journalière de la zone d'implantation et l'accès à un journal numérique de suivi d'utilisation. Sélectionner la **rubrique Suivi** pour obtenir les informations essentielles.

NB : Réponses aux questions fréquentes telles que la vie quotidienne avec Ponto, les bonnes habitudes, les examens IRM et Ponto ou encore, Ponto et voyages.

Ponto Care

**Application gratuite
disponible en téléchargement**

Pour plus d'informations sur la compatibilité de l'application, veuillez consulter www.oticonmedical.com/ptc-app-compatibility